


## Bruksanvisning S-Monovette® Vakuumpriinsippet

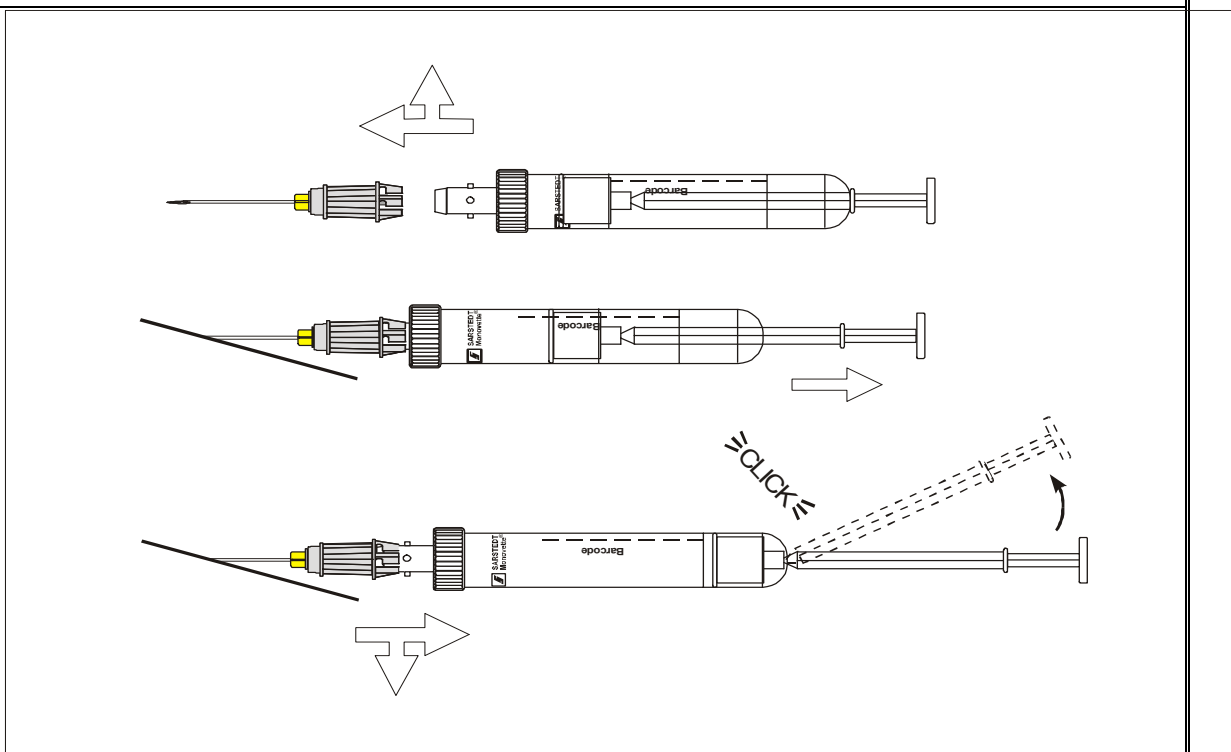

Når man benytter vakuumpriinsippet må venen punkteres direkte med kanylen (uten festet S-Monovette®), eller man kan fylle det første røret etter aspirasjonspriinsippet, og deretter bruke vakuumpriinsippet.

- a) Vakuum dannes ved at stempelet trekkes helt til bunnen av røret, og låses ved at man hører et "klikk" og knekker stempelstangen av (se fig. 1).
- b) Løsne stasebåndet og fest S-Monovette® i holderen ved å vri røret forsiktig i klokkeretningen som vist på fig. 2 og 3.
- c) Vent til blodstrømmen stanser og røret er fylt opp.
- d) Fjern S-Monovette® fra kanylen ved å vri forsiktig mot klokkeretningen (se fig. 4 og 5). Kanylen sitter fortsatt i venen.
- e) Dersom det skal tas flere prøver, monteres ny prevakuumert S-Monovette® som beskrevet ovenfor.

### Avslutning av blodprøvetakingen:

- f) Demontér den siste S-Monovette® fra kanylen (se fig. 4 og 5) før denne trekkes ut av venen.

*NB! Husk at S-Monovette® skal fjernes før kanylen tas ut av venen!*

- g) Bland røret godt.